



Camilla PRIM 2 secciones eléctrica gris

# Camilla PRIM 2 secciones eléctrica gris

Camilla eléctrica destinada a observación y tratamiento.

El dispositivo está clasificado como un producto de rehabilitación y está diseñado para acomodar a los pacientes durante la observación o los tratamientos.

## SEGURIDAD

- La camilla debe usarse solo para el propósito para el que fue diseñada;
- Controlar periódicamente la estabilidad de la camilla ajustando el nivelador;
- La camilla no debe ser utilizada por pacientes que pesen más de 180 kg;
- Se debe prestar especial atención al peligro de aplastamiento en las partes móviles;
- El paciente debe sentarse exclusivamente en el área del asiento, evitando así el desequilibrio de la mesa y posibles caídas/lesiones;
- El ascenso del paciente a la mesa debe realizarse con el armazón en su posición más baja;
- No derrame líquidos sobre el tapizado.

## ALMACENAMIENTO/CONSERVACIÓN

- Todas las camillas PRIM se empaquetan en cartón, no deben exponerse a la lluvia ni en lugares con demasiada humedad, evitando así daños tanto en el embalaje como en el producto;
- Los productos deberán almacenarse en lugares seguros que garanticen la protección contra caídas o cualquier otra situación que pudiera dañarlos;
- Antes de las operaciones de limpieza consultar el manual del producto.



## DATOS DEL PEDIDO:

833692 Camilla PRIM 2 secciones eléctrica gris

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

### Estructura:

- Estructura de tubo de acero soldado;
- Pintura epoxi con tratamiento antibacteriano;
- Ajuste del respaldo mediante resorte de gas accionado por palanca en la parte posterior del respaldo;
- Ajuste de altura eléctrico.
- 4 ruedas con sistema de inmovilización;
- Nivelador en la base. Sistema de nivelación en todos sus apoyos.
- Incorpora soporte de papel.

### Tapizado:

- Tapizado dividido en MDF con espuma de 50 mm;
- Con apertura facial en el tapizado del cabecero para mayor comodidad del paciente;
- Revestimiento en tejido lavable confeccionado en napa de alta resistencia.

### Dimensiones generales:

- Dimensiones tapizado: 1900x610 mm
- Ajuste de altura: 545 a 910 mm
- Ángulo de ajuste del cabecero: 70°

Es posible solicitar otros colores de tapizado bajo pedido.



PRIM

PRIM S.A. P. Industrial Nº1 Calle Yolanda González 15. 28938 Móstoles - Madrid

telf: 91 334 24 00 info.fisioterapia@prim.es

Delegaciones: Barcelona - Bilbao - La Coruña - Las Palmas - Madrid - Palma de Mallorca - Sevilla - Valencia



R 23 03 008F R00

www.primphysio.es