

al Servicio de la Salud

Rueda de Hombro 75 cm, CÓD: 501867



PRIM

Fisioterapia y Rehabilitación


Manual de usuario



PRIM S.A.
Avenida del Llano Castellano, 43 planta 3
28034 Madrid, España
Teléfonos: 91 334 25 86
Fax: 913 342 517
e-mail: info.fisioterapia@prim.es
www.prim.es

M.U. 501430 rev 7 05/12/2024



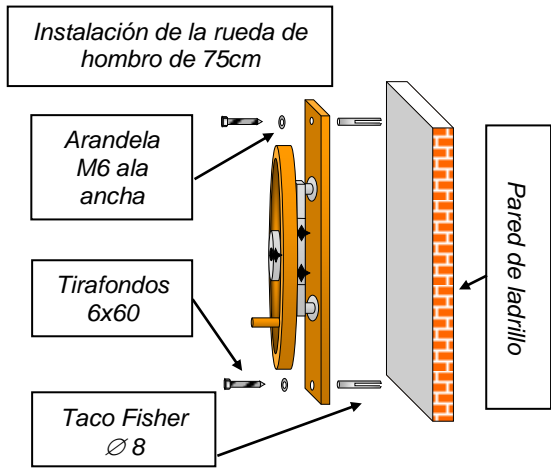


Instalación:

⇒ Fijar la rueda de hombro en la pared utilizando los componentes de instalación que se suministran junto con la rueda, la rueda dispone de orificios para realizar esta instalación. Los anclajes de instalación son sólo aptos para paredes de construcción sólida (ladrillo), si la pared está hueca, la rueda debe ser instalada utilizando materiales de anclaje adecuados (no suministrados). Prim, S.A., declina cualquier responsabilidad por una instalación inadecuada.

Modelo	Tirafondos 6x60	Arandela M6 ala ancha	Taco fisher Ø 8	Orificios soporte
75 cm	2 unidades	2 unidades	2 unidades	2


Instrucciones de utilización:

⇒ Este aparato debe utilizarse siguiendo las indicaciones de un facultativo especialista.
 ⇒ Regulaciones: Antes de utilizar el aparato se debe ajustar la altura, el diámetro de giro y la fuerza de fricción.

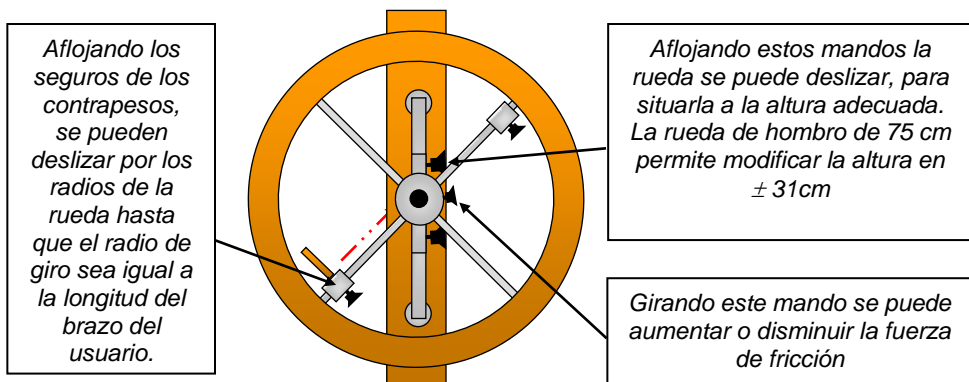

⇒ Realización de los ejercicios.

Una vez realizadas las regulaciones el usuario deberá tomar la empuñadura con la mano del brazo que quiera ejercitar y realizar el movimiento de flexión-extensión del hombro.

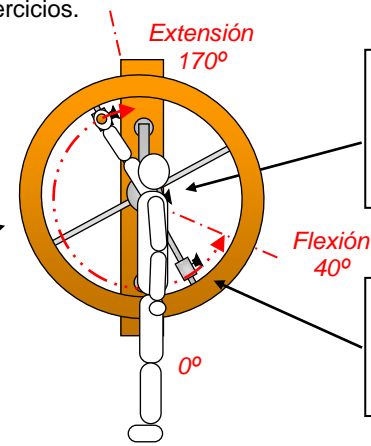

Para realizar el ejercicio correctamente el hombro del paciente debe estar a la altura del centro de la rueda.

Los contrapesos de la rueda deben estar a la misma distancia del eje de rotación

Indicaciones.

⇒ Cinesiterapia activa resistida.

Advertencias.

⇒ Para evitar el riesgo de atraparse los dedos o las manos no toque el aparato mientras se esté utilizando. También se debe tener precaución al realizar los ajustes previos a su utilización.
 ⇒ Algunos materiales del equipo son NO ignífugos por lo que se recomienda no usar el aparato en ambientes con excesivo calor, fuego o radiaciones.

Mantenimiento:

⇒ Se deben realizar revisiones periódicas del producto y controlar su evolución.
 ⇒ Se recomienda una limpieza periódica (diaria o semanal) del aparato con un paño húmedo utilizando agua o un líquido limpiador casero no abrasivo.

Descripción Técnica:

- ⇒ Soporte y rueda fabricadas en madera de haya barnizada en su color.
- ⇒ Radios, soporte corredera, contrapesos y freno fabricados en acero cromado.
- ⇒ Cód: 501867 (Rueda de hombro de 75cm)
 - Medidas: 84x75x20cm
 - Peso: 11.5 kg.

Clasificación: Clase I, no estéril, sin función de medición Este producto cumple con los requisitos del Reglamento (UE) 2017/745 por el que se regulan los productos sanitarios.

Asistencia Técnica: En caso de avería o fallo debe ponerse en contacto con Prim S.A. indicando el código, descripción y nº de lote del aparato.

Cualquier incidente grave relacionado con el producto debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que estén establecidos el usuario y/o el paciente.